

VADEMECUM SEDIA MOTORIZZATA

1. SISTEMAZIONE DELLA SEDIA NEL SUPPORTO PREDISPOSTO NELL'AMBULANZA N° 4;
2. SCAMBIO BATTERIE: PRENDI QUELLA IN CARICA, NELLA POSTAZIONE VICINO POSTAZIONE AREA 3, E LA SOSTITUISCO CON QUELLA CHE ERA IN AMBULANZA;
3. AGGANCIO DELLA BATTERIA CHIUDENDO LA SICURA CON CHIAVE CHE ANDRÀ STACCATA ED AGGIUNTA ALLA CHIAVE DELL'AMBULANZA;
4. AL MOMENTO DELL'UTILIZZO ACCENDERE LA SEDIA ED APRIRLA (vedi video n° 1 *Accensione e descrizione*) POSIZIONARE IL POGGIATESTA E FARE ATTENZIONE ALLA CHIUSURA DELLE CINGHIE (vedi video n° 2 *spiegazione corretto collegamento cinghie*).
SI RICORDA L'IMPORTANZA DI FARE SICURA AGLI OPERATORI (vedi video n° 3 *salita con sicura* e n° 4 *discesa con sicura*);
5. TERMINATO L'UTILIZZO SANIFICARE LA SEDIA, SPEGNERE LA BATTERIA E CHIUDERLA (vedi video n° 5 *chiusura sedia*);
6. A FINE SERVIZIO TOGLIERE LA SEDIA DALL'AMBULANZA PRIMA DI PROCEDERE CON LA SANIFICAZIONE: LO IONIZZATORE DANNEGGIA LA GOMMA DEI CINGOLI!